



LE MONTE-ESCALIER CURVE

P A R P L A T I N U M

CURVE PAR PLATINUM


Le double rail Curve de Platinum est fabriqué à la main au Royaume-Uni, en prenant en compte les mesures exactes de vos escaliers. Le siège étant entièrement réglable, il s'adapte parfaitement à la taille et à la forme de votre corps.

Les angles droits, les spirales, les détours et les coins ne sont pas un problème pour le Curve puisque le rail est construit sur mesure. Avec le Curve de Platinum, les déplacements sont fluides, confortables et agréables, vous permettant ainsi de profiter pleinement de votre maison.

De plus, les fixations au sol et la conception compacte du rail signifient que le Curve prend peu de place et n'a aucune incidence sur la décoration de votre intérieur.

Pour les escaliers courbes, il n'y a pas de meilleur choix que le double rail Curve de Platinum.



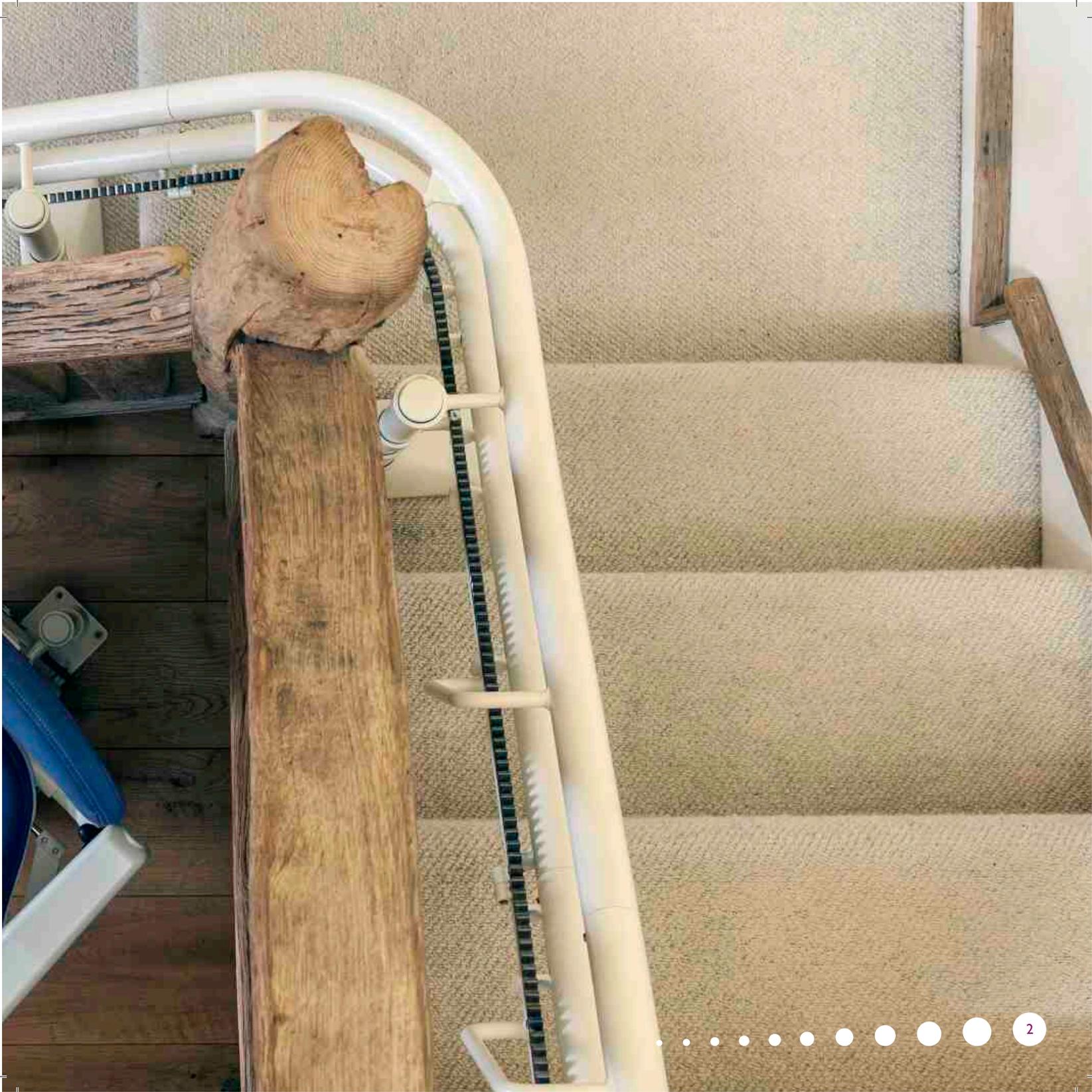

LE CURVE : ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1

Abaissez les accoudoirs, l'assise de votre siège puis le repose-pied. Votre monte-escalier Curve est prêt à l'emploi. L'écran numérique affiche « Platinum » signifiant que vous êtes prêt à vous déplacer.



ÉTAPE 2

Le siège aura déjà été entièrement ajusté à la taille et à la forme de votre corps lors de l'installation. Vous n'avez donc plus qu'à vous asseoir, vous attacher et vous détendre pour profiter du trajet.



ÉTAPE 3

Pour profiter de votre monte-escalier Platinum Curve, il vous suffit simplement d'utiliser le joystick ergonomique situé au bout de l'accoudoir et de le pousser légèrement dans la direction souhaitée.



ÉTAPE 4

Une fois en haut des escaliers, utilisez le levier de pivotement situé sous l'accoudoir (le pivotement motorisé existe en option), pour faire tourner la chaise et descendre en toute sécurité sur le palier.



Lorsqu'il n'est pas utilisé, votre Curve peut être replié et stationné dans les escaliers, laissant un accès libre aux autres membres de la famille..


ÉTAPE 5

LE RAIL DU CURVE

Le double rail est fabriqué manuellement au Royaume-Uni pour s'adapter spécifiquement à vos escaliers. Disposant d'un support solide et d'une qualité de déplacement fluide de vos escaliers.

Options de départ

Départ standard

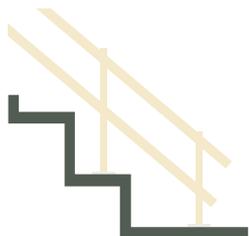

Départ court




Départ horizontal




Options d'arrivée

Arrivée standard

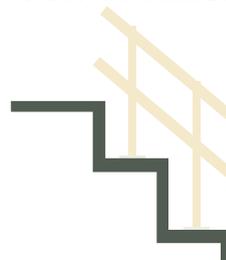


Prolongement horizontal sur le palier

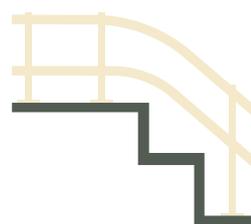

Options disponibles pour les deux

Court, à 90° ou 180°

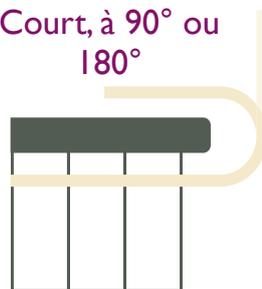


CARACTÉRISTIQUES DU SIÈGE ERGO


Le siège Ergo de Platinum est l'un des plus avancées de l'industrie. Conçu avec l'utilisateur à l'esprit, ce siège dispose d'une multitude de fonctionnalités intégrées.




Poids Maximum modèle standard 120Kg Option grande capacité 160Kg

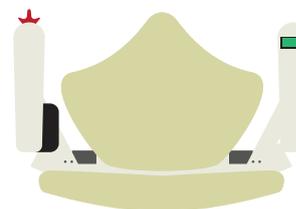


Assise Ergo Plus en option

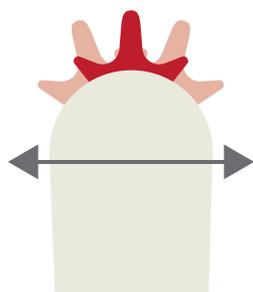


Joystick Ergonomique

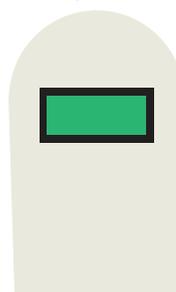

Écran Digital dans l'accoudoir

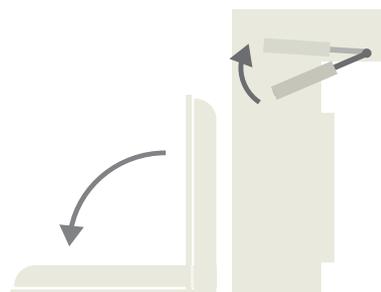


Levier pour actionner le repose-pied

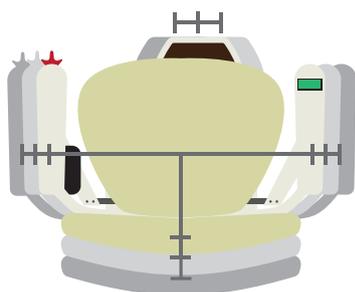

Accoudoirs, dossier et repose-pied ajustables





Ceinture de sécurité rétractable

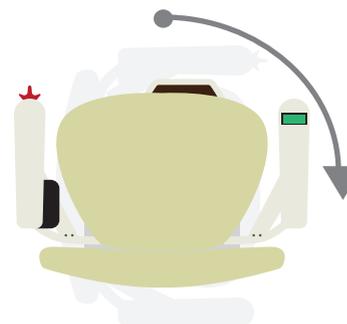

Pivotement manuel en standard, Pivotement motorisé disponible en option

DIMENSIONS DU CURVE

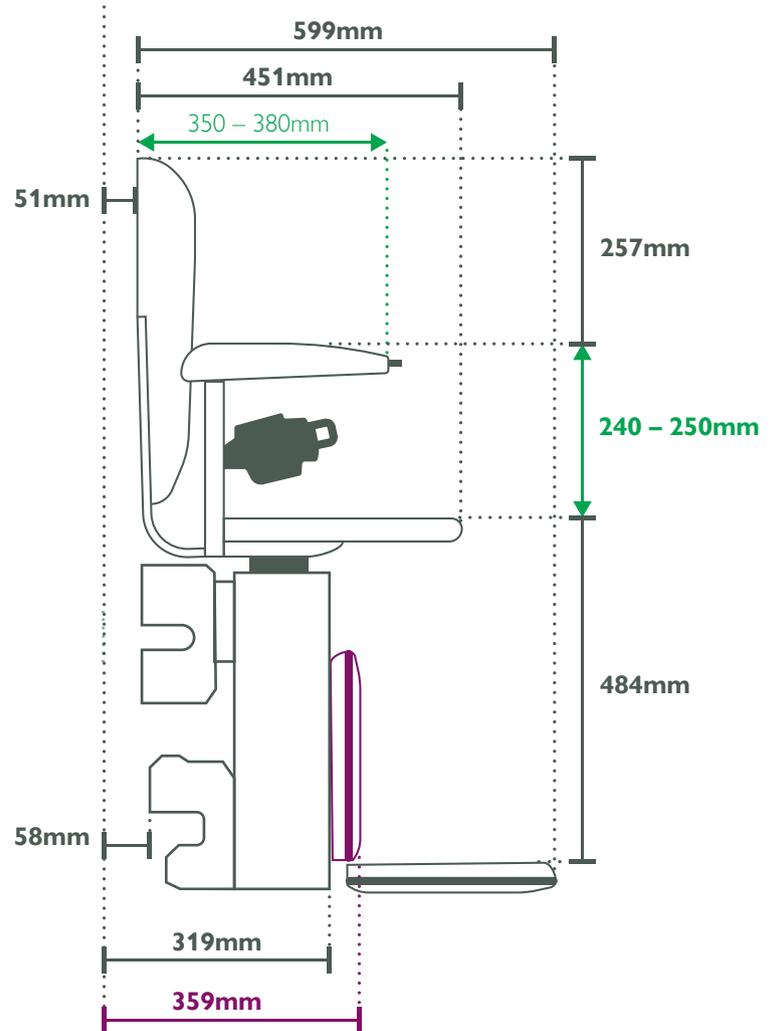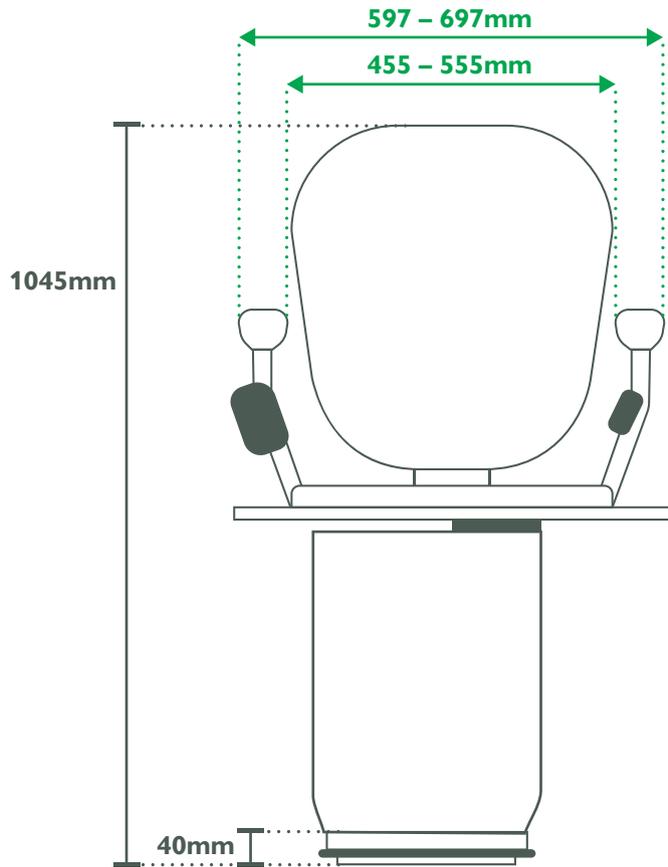


ERGO SPACE

Le siège compact ERGO Space est conçu pour les monte-escaliers Curve qui sont installés dans des escaliers étroits, où l'espace est limité

Le siège ERGO Space épouse le corps de l'utilisateur, permettant à son dos d'être plus proche du mur de 60mm

par rapport au siège ERGO normal. De plus, le dossier Space est plus court que celui du siège ERGO standard éliminant ainsi tout conflit avec les omoplates de l'utilisateur.

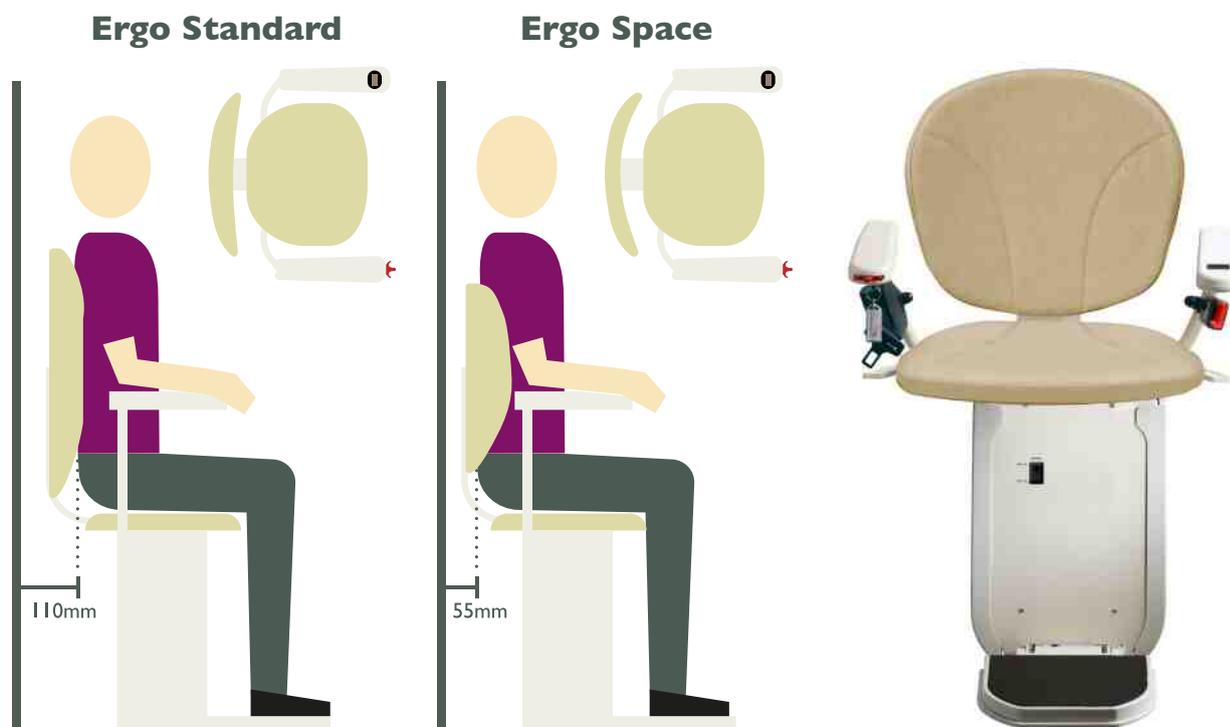


ASSISE ERGO PLUS



L'assise ERGO PLUS apporte du confort pour beaucoup d'utilisateurs : qu'ils aient des difficultés à plier les genoux sur le bord de l'assise ou qu'ils soient de petites tailles ne leur permettant pas d'atteindre le repose-pied.

L'assise ERGO Plus a été spécialement conçue et a la particularité d'avoir des bords incurvés ; ce qui permet aux cuisses de l'utilisateur d'être plus basses pour que les pieds puissent toucher le repose-pied. Adopter cette position assise plus naturelle et sûre peut faire gagner jusqu'à 25mm.

L'assise PLUS est disponible sur le modèle ERGO, ERGO HD et ERGO SPACE

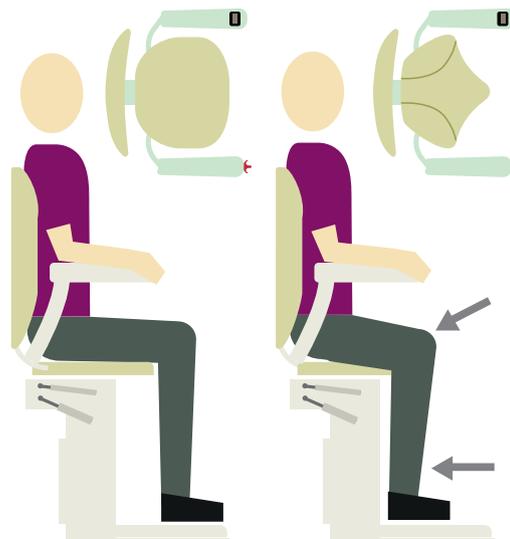

COULEURS DISPONIBLES POUR LE SIÈGE ERGO



Coordonnées du revendeur agréé par Platinum

Platinum Stairlifts
Crosshills, Keighley West Yorkshire, BD20 7BW